


Consejos importantes para optimizar el monitoreo con el parche CAM®



PREPARACIÓN DE LA PIEL

Es necesario preparar la piel debidamente para poder lograr el monitoreo durante todo el plazo prescrito.

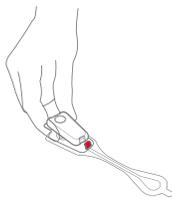

CONEXIÓN DEL PARCHÉ CAM

Conecte el registrador al parche CAM sobre una superficie dura y plana (como el tablero de una mesa) y NO directamente sobre el pecho.



ESTÉ PENDIENTE DE LA LUZ

Justo después de conectar el registrador en el parche CAM, esté pendiente de una luz verde que parpadeará durante 10 segundos.



DIARIO DEL PACIENTE

Anote en el diario la fecha y hora de activación del parche CAM, así como cada pulsación del botón asociada a sus síntomas.